

## КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО АРМИРОВАНИЮ РЕСТАВРАЦИИ (постоянные и временные реставрации из светоотверждаемых композитных материалов или С&В материалов)

**Стекловолоконные ленты DENTAPREG™, ипрегнированы в композитных смолах**

1. Изолируйте рабочее поле и подготовьте ткани зуба к реставрации обычным способом.



3. Проведите адгезивную подготовку обычным способом, светоотверждаемым адгезивом.



5. Проведите отверждение начальных слоев реставрационного композита.



7. Нанесите тонкий (~1мм.) слой текучего композита или слой реставрационного композита (~1-2мм.) и не полимеризуйте его.



9. Надрежьте защитную пленку, удерживая ленту с одной стороны, захватите пленку пинцетом и снимите ее с ленты.



11. Отвердите ленту светом.



13. Отвердите и отполируйте поверхность реставрации обычным способом.



2. Протравите, смойте протравку и просушите поверхность.



4. Начните реставрацию обычным способом с помощью светоотверждаемых композитов.



6. Замеряйте нужный размер ленты для армирования реставрации.



8. Отмерьте и отрежьте нужную длину ленты.



10. Уложите ленту на слой не отвержденного композита и адаптируйте ленту.



12. Продолжите реставрацию обычными светоотверждаемыми реставрационными материалами.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Лента должна быть покрыта композитом:  
≤ 1мм. с боковых поверхностей  
≤ 2мм. с окклюзионной поверхности*