

## КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОСТА НЕПРЯМЫМ СПОСОБОМ

**Стекловолоконные ленты DENTAPREG™, ипрегнированы в композитных смолах**

1. Определите вид ленты, которую планируете применить для будущей работы с учетом клинической ситуации.

3. Сделайте оттиск для изготовления гипсовой модели.

5. Замеряйте длину ленты с учетом изгибов.

7. Надрежьте защитную пленку, удерживая ленту с одной стороны, захватите пленку пинцетом и снимите ее с ленты.

9. Отвердите ленту светом, поэтапно на каждом зубе (40сек. на каждый зуб) и отложите ее в сторону.

11. Уложите ленту на не отвержденный композит и адаптируйте ее.

13. Изготовьте мост с помощью композитного материала для изготовления вкладок.

15. Проведите подготовку зубных полостей и готового моста к фиксации (протравка, адгезив фиксирующий цемент...).

2. Отпрепарируйте эмаль соседних зубов с помощью алмазного бора, учитывая покрытие ленты слоем композита ~ 2мм.

4. Изготовьте гипсовую модель и подготовьте ее к работе.

6. Отмерьте и отрежьте нужную длину ленты, расправив восковый шаблон.

8. Уложите ленту на место и адаптируйте ее, не прилагая при этом больших усилий, чтобы не повредить стекловолокна.

10. Нанесите композитный материал на подготовленную гипсовую модель, адаптируйте его в полости перед укладкой ленты

12. Отвердите композит светом согласно инструкции его производителя.

14. Проведите финишную полировку реставрации обычным способом.

16. Установите и зафиксируйте мост, уберите излишки цемента, проведите финишные работы обычным способом.

