

КЛИНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОСТА ПРЯМЫМ СПОСОБОМ

Стекловолоконные ленты DENTAPREG™, ипрегнированы в композитных смолах

1. Определите вид ленты, которую планируете применить для будущей работы с учетом клинической ситуации.

3. Замеряйте длину ленты с учетом изгибов.

5. Проведите адгезивную подготовку зубов с помощью обычно используемого для реставраций отверждаемого светом адгезива.

7. Отмерьте и отрежьте нужную длину ленты, расправив восковый шаблон.

9. Уложите ленту на место и адаптируйте ее, не прилагая при этом больших усилий, чтобы не повредить стекловолокна.

11. Наносите послойно поверх отвержденной ленты, адаптируйте и отверждайте композитный материал для завершения реставрации.

2. Отпрепарируйте эмаль соседних зубов с помощью алмазного бора, учитывая покрытие ленты слоем композита ~ 2мм.

4. Протравите поверхность зубов, смойте протравку и просушите поверхность.

6. Нанесите тонким слоем текучий композит, распределите его кисточкой по поверхности и не отверждайте

8. Надрежьте защитную пленку, удерживая ленту с одной стороны, захватите пленку пинцетом и снимите ее с ленты.

10. Отвердите ленту светом, поэтапно на каждом зубе (40сек. на каждый зуб).

12. Проведите финишную полировку реставрации обычным способом.

